



Basisplan/ Anwendung Bemer Horse- Set

1. Das Bemer Horse- Set ist zu Beginn der Mietzeit vollständig geladen. Bitte lassen Sie den Akku erst vollständig leerlaufen, bevor Sie es erneut aufladen. Sollte das Laden während der Mietzeit nötig sein, finden Sie beiliegend ein Ladegerät mit einem Y- Stecker, mit welchem Sie zwei Geräte gleichzeitig laden können (z.B. beide Gamaschen gleichzeitig, oder die Decke und zusätzlich eine Gamasche). Das Laden eines einzelnen Gerätes ist selbstverständlich auch möglich.
2. Bitte desinfizieren Sie die Decke, sowie die Gamaschen vor der ersten Anwendung, sowie nach der letzten Anwendung mit dem beigelegten Desinfektionsmittel (Saltisept), um möglichen Infektionen durch das Mietgerät aus dem Wege zu gehen.
3. Bitte verwenden Sie bei der Anwendung der Decke, eine saubere Abschwitzdecke und legen diese unter die Bemer- Decke, sodass die Bemer- Decke nicht direkt auf dem Pferdekörper aufliegt. **Hierbei handelt es sich lediglich um einen Infektionsschutz! Sie müssen keine Bedenken haben, dass das Signal der Bemer- Decke geschwächt werden könnte oder seine Intensität verliert.**
4. Bitte lassen Sie das Pferd während der Anwendung nicht unbeaufsichtigt und angebunden.
5. Bei Verwendung der Gamaschen, empfehlen wir immer eine ganzheitliche Behandlung einschließlich der Decke, da so nicht nur speziell die peripheren Gefäße (in den Beinen) angesprochen werden, sondern das gesamte System angesprochen wird.
6. Die alleinige Anwendung der Decke, ist problemlos möglich.
7. Die Decke, sowie auch die Gamaschen, starten Sie an dem orangenen Steuergerät, in dem Sie einen der Knöpfe lange gedrückt halten, bis das Steuergerät den Akkustand in grün leuchtenden Balken anzeigt. Anschließend drücken Sie den entsprechenden Knopf zur Auswahl Ihres Programmes.
8. Sobald das ausgewählte Programm gestartet ist, fängt neben dem entsprechenden Knopf ein grünes Leuchtsignal an zu blinken.
9. Wenn das ausgewählte Programm beendet ist, erlischt das Leuchtsignal.

10. Die Decke schaltet sich nach einer gewissen Zeit, nach Beendigung des Programmes, selbst aus. Möchten Sie die Decke vorher ausschalten, drücken Sie wieder einen der drei Knöpfe so lange, bis der Akkustand erlischt.

11. Zur Anwendung empfehlen wir folgenden **Basisplan** sowohl für die Decke, als auch die Gamaschen:

Woche 1: Programm 1 (.) Dauer 5 Minuten

Woche 2: Programm 2 (..) Dauer 10 Minuten

Woche 3: Programm 3 (...) Dauer 15 Minuten